


CV-1500 使用注意事项

说明：本次信息仅针对290系列内镜与EVIS X1主机的连接注意事项，详细方法请参照相应的《使用说明书》和《清洗、消毒、灭菌手册》。

内镜通信不良警示信息

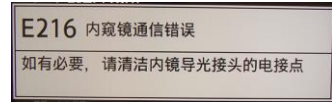


注意：以上警示信息一般与内镜连接状态有关，当290型内镜与CV-1500连接时，若电气接点接触不良就会出现上述通信不良的警示信息，并非主机零件故障。以下为现场对应方法，如需帮助请联络CIC医疗内镜客户服务中心。

原因分析

① 导光接头部电气接点残留水珠，影响通信



② 导光接头部电气接点有污渍、腐蚀、凹陷，接触不良

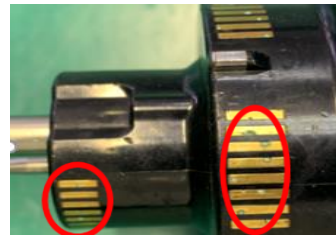


现场对应方法：

Step 1: 关闭电源



注意：如不关机，重新连接内镜后仍会出现E117报错，E117为内镜电气接点接触不良引起的，并非主机零件故障。

Step 2: 移除内镜后对电气接点进行清洁

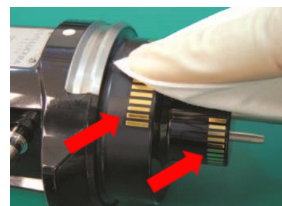

注意：请用蘸有75%的酒精纱布擦拭内镜导光接头部的电气接点，再**充分干燥**。

Step 3: 重新连接内镜



注意：内镜插入主机插口前，需确认导光插头部的圆点标记朝上。

Step 4: 开启电源



确认恢复正常。



OLYMPUS
智能服务 扫码报修
400-820-2084